

Vcheck M

Respiratorio Canino 8 Panel

Especificaciones



Objetivo de
detección

- : ① Adenovirus canino tipo 2
② Virus distemper canino
③ Virus parainfluenza canina
④ Coronavirus respiratorio canino
⑤ *Mycoplasma cynos*
⑥ Virus influenza canina
⑦ *Bordetella bronchiseptica*
⑧ Herpesvirus canino tipo 1

Especies

: Canino

Tipo de muestra

: Hisopado conjuntival y hisopado faríngeo profundo

Tiempo de prueba

: 70 minutos

Duración

: 12 meses

Procedimiento de prueba


1

Recolecta mediante movimientos circulares y vierte en el tubo por 10 segundos

No frotar en el
área azul

Sé cuidadoso de no tocar
la lengua o demasiada saliva


10 seg

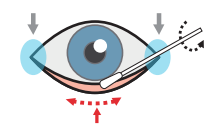

Frota en el área roja




Frota en el área faríngea

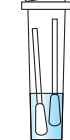

2

Dosifica 300 µl de la muestra completamente mezclada

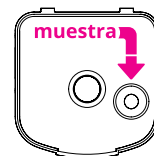

Desempeño

Sensibilidad analítica (Límite de detección, LoD)

	CAV-2	CDV	CPIV	CRCoV	M.cynos	CIV	B.bronchiseptica	CHV-1
LOD (copias/ml)	0.02 TCID50/mL	49.52 TCID50/mL	92.79 TCID50/mL	800 copias/mL	0.37 CFU/mL	0.03 TCID50/ml	145.83 CFU/mL	94800 TCID50/ml

Información de pedido

Producto No.	Nombre del Producto	Condición de Uso	Unidad de Embalaje
VCM110AC	Vcheck M Canine Respiratory 8 Panel	2 ~ 28 °C	5 Tests/Kit